



RIDDER | *Assistent*

★★★★★ COMFORT




A170101 A170117

A170110



CONTINUTUL PACHETULUI:

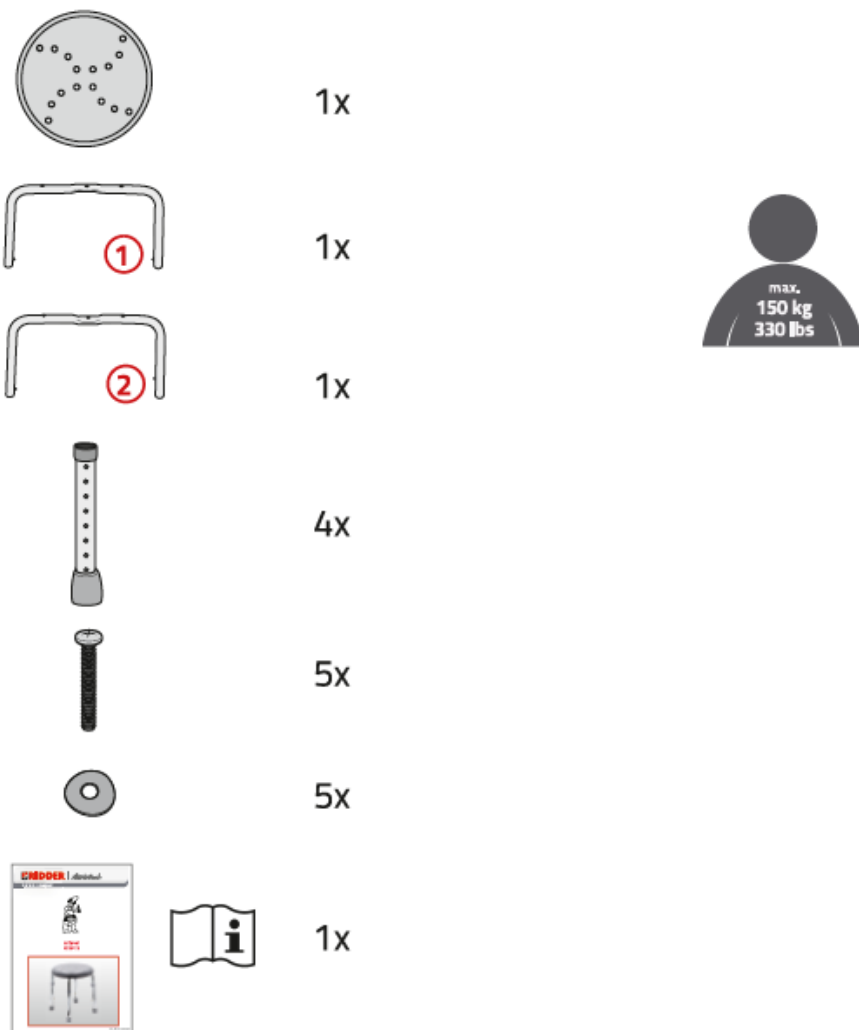

Indicatii importante!

Înainte oricărei utilizări, verificați în orice caz ca dispozitivul de reglare al înălțimii să aibă o poziție uniformă. Picioarele trebuie să atingă podeaua cu toate cele 4 puncte de contact. Nu vă urcați cu picioarele pe scaun. Țineți materialul de ambalare departe de copii. Suprafețele umede pot afecta efectul antiderapant. Certificatul nu conține teste pentru utilizarea de către persoane/pacienți care se află în sectoare de reabilitare sau îngrijire medicală. Utilizare maximă recomandată: 5 ani. Nu utilizați produsul dacă este deteriorat. Siguranța verificată până la 150 de kg.

Indicatii privind curățarea și întreținerea:

1. Pentru întreținere, folosiți doar detergenți din comerț, adecvați produsului.
2. Nu folosiți detergenți abrazivi, agresivi sau care conțin solvenți.
3. Ulterior, se poate usca cu ajutorul unei lavete absorbante.

ASAMBLAREA:

