



RIDDER | *Assistent*

★★★★★ PREMIUM



Manual de utilizare si asamblare
A0256001 - A0256010

NOTA!

Stimate client,

Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta inainte de utilizare si sa pastrezi manualul pentru utilizarea in continuare.

Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru asamblarea defectuoasa sau utilizarea necorespunzatoare a produsului.

Instructiuni de siguranta:

Aceste ventuze de aspiratie servesc pe post de maner de prindere si va sprijina in timp ce stati in picioare pana la rezolvarea problemelor de echilibru. Durata de viata recomandata: 5 ani.

Acest maner de prindere este facut numai pentru utilizare temporara, recurenta si trebuie sa fie

reinstalat inainte de fiecare utilizare. Aceste ventuze de aspirare sunt potrivite pentru

persoane cu greutatea corporala de maxim 120 kg si serveste ca maner de prindere

sau sprijin in timp ce stai in picioare. Nu-l utilizati pentru a atarna lucruri pe el. A nu se lasa la

indemana copiilor materiale de ambalare. Suprafetele umede pot afecta functia anti-alunecare.



Utilizarea:


ATENTIE!

Pericol de cadere la locul de montare!

Bara de prindere a aspiratiei atinge o putere de retinere foarte mare datorita constructiei aspiratiei ventuzei, cupelor si vidului care rezulta prin strangerea lor. Puterea detinuta de catre maner este atinsa doar atunci cand pozitia de montare este suficient de solida pentru a mentine sarcina si cand este garantat ca vidul a fost realizat.

Pozitia de montare trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

- Stabilitatea peretelui de fixare (1,5 x sarcina maxima)
- Curatirea (fara grasimi, murdarie si praf)
- Impermeabilitatea aerului (de exemplu, sticla, placi vitrate)
- Suprafata perfect neteda si neporoasa

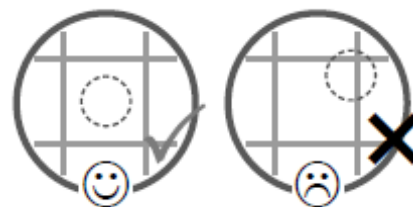

Nota de avertizare pentru efectuarea vidului:


Urmele foarte putin vizibile de deteriorare ale suprafetei de aplicare pot afecta efectuarea vidului și, prin urmare puterea de aspiratie. Din acest motiv, va recomandam sa testati foarte atent fiecare pozitie dorita inainte de utilizare si sa luati in considerare instructiunile.

IMPORTANT!!


Verificati cu atentie puterea de mentinere inainte de fiecare utilizare !!!

Nu utilizati produsul daca este deteriorat !!!


MONTAREA:

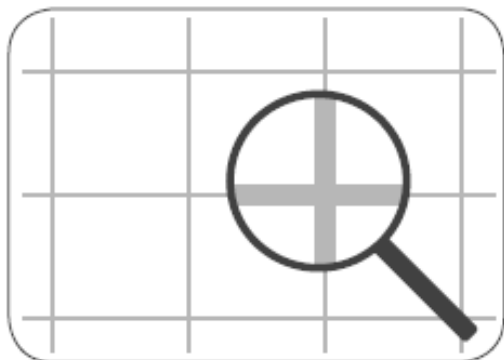


1. Verificati cu atentie locul de montare, daca este potrivit si pentru a exclude posibile daune, asa cum este descris anterior.

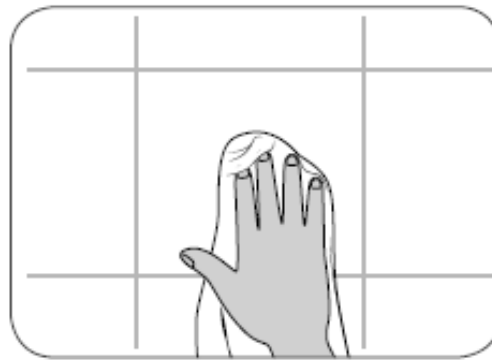


2. Curatati cu atentie suprafata inainte de montare cu solutii obisnuite din comert si aveti grija ca suprafata sa nu prezinte murdarie, praf si grasime.

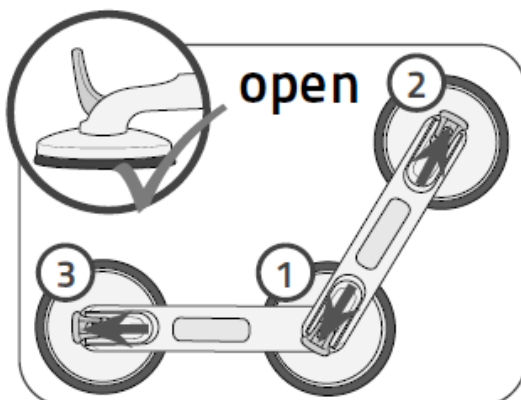


3. Asigurati-va ca parghiile de fixare sunt deschise, inainte de montare.

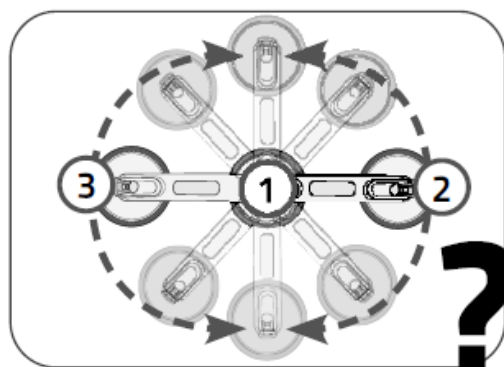

4. Reglati manerul. Asigurati-va ca ventuzele nu sunt peste rosturile faiantei / ceramicii de pe peretii incaperii

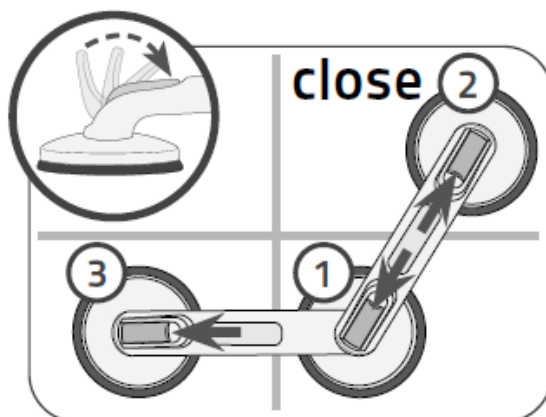


5. Apasati manerul cu presiune in pozitia de montare pe perete si inchideti maneta de fixare. In acest fel apare efectul de vid.

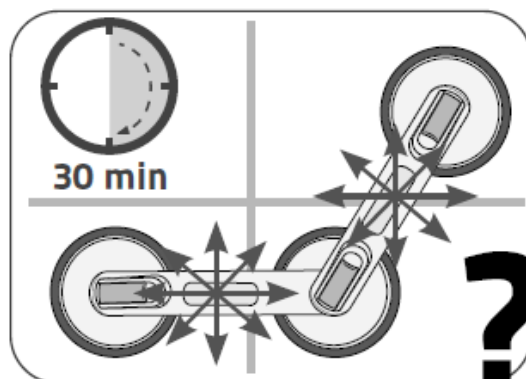

6. Inainte de utilizare, va rugam sa asteptati 30 de minute de precautie, iar apoi verificati din nou puterea de sustinere a manerului.

DEMONTAREA SI REUTILIZAREA:

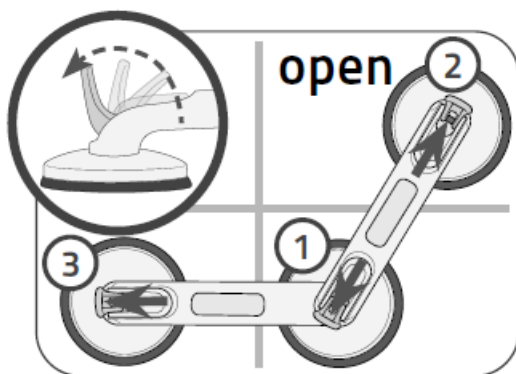

7. Pentru demontare, deschideti parghiile de fixare si indepartati manerul de prindere de pe perete.



8. Daca ventuzele prezinta reziduuri de murdarie, pot fi spalate cu apa si sapun obisnuit. Nu utilizati agenti de curatare pe baza de solventi, acizi sau abrazivi! Dupa o curatare corecta, manerul de prindere este gata de utilizare din nou. Va rugam sa respectati pasii 1-6.

i **NOTA!**

Instructiuni de curatare si ingrijire:

Va rugam sa acordati atentie instructiunilor de curatare si ingrijire.

In cazul utilizarii necorespunzatoare, produsul poate fi deteriorat. Curatati-l cu apa si detergenti comerciali obisnuiti. Ulterior, puteti usca produsul cu o carpa.

Nu folositi niciodata agenti de curatare abrazivi, cu solventi sau acizi pentru a curata ventuza. Ventuza ar trebui sa fie curatata cu apa si cu sapun.

Asigurati-va ca nu exista praf pe ventuza si pe perete, altfel puterea de sustinere poate fi afectata.