



RIDDER

Assistent

★★★★★ ECO



A041101





Stimate client,

Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta inainte de utilizare si sa pastrezi manualul pentru utilizarea in continuare.

Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru asamblarea defectuoasa sau utilizarea necorespunzatoare a produsului.

Instructiuni importante:

Inainte de fiecare folosire, verificati pozitia scaunului, etrierele trebuie sa fie fixate in toate cele 6 puncte de sprijin de pe perete.

Scaunul de dus rabatabil este utilizat exclusiv ca scaun in timpul dusului si in uz privat.

Inaltimea de montare a scaunului depinde in mod standard de inaltimea utilizatorului.

Pentru a stabili in cea mai simpla modalitate inaltimea de montare a scaunului de dus, va recomandam urmatoarele:

Masurati inaltimea scaunului alaturi de un scaun confortabil pentru utilizator si montati scaunul de dus la o inaltime similara.

Nu stati pe scaun inainte de a fi montat.

Suprafetele umede pot afecta functia antiderapanta.

Utilizarea maxima recomandata este de 5 ani. Nu mai utilizati produsul daca este deteriorat.

Instalatorul trebuie sa se asigure ca rezistenta zidului garanteaza o atasare sigura a tuturor șuruburilor de montare pe perete.

Asamblarea trebuie, in orice caz, sa fie efectuata pe un suport stabil, pe un perete cu o suprafata neteda.

Evitati solicitarea brusca a scaunului pliabil pentru dus Ridder.


Instructiuni de curatare si ingrijire:

1. Nu folositi substante de curatare abrazive sau agresive, in niciun caz diluant sau benzina.
2. In cazul depunerii puternice de calcar, Ridder recomanda esenta de otet 25% sau otet de casa.
3. Nu folositi detergenti care ataca materialul plastic.

CONTINUTUL PACHETULUI:



1x

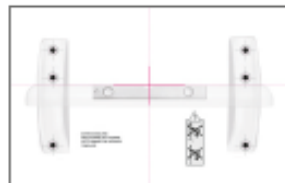

1x



6x



6x



4x



2x



1x



RIDDER GmbH
 Ridder Straße 1
 D-56379 Singhofen
 Tel.: +49 (2604) 9541-0
 Mail: info@ridder-online.de
www.ridder-online.de

ASAMBLAREA:

