




RIDDER | *Assistent*


★★★★★ COMFORT



A141100

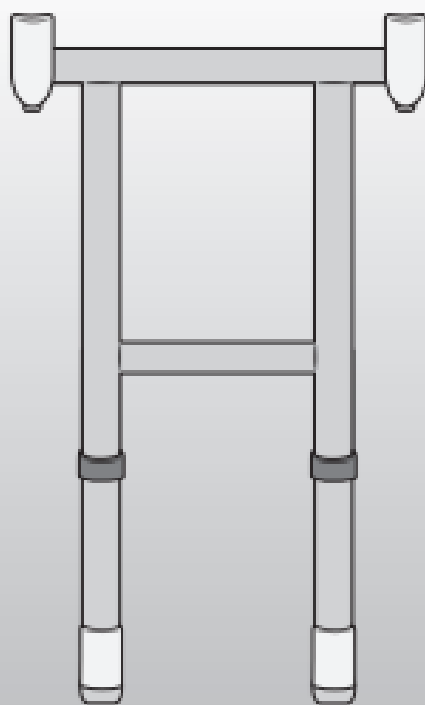

CONTINUTUL PACHETULUI:

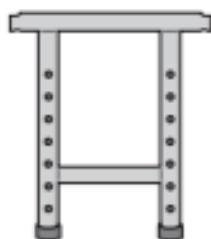

1x



2x



2x



4x






1x



1x

ASAMBLAREA:

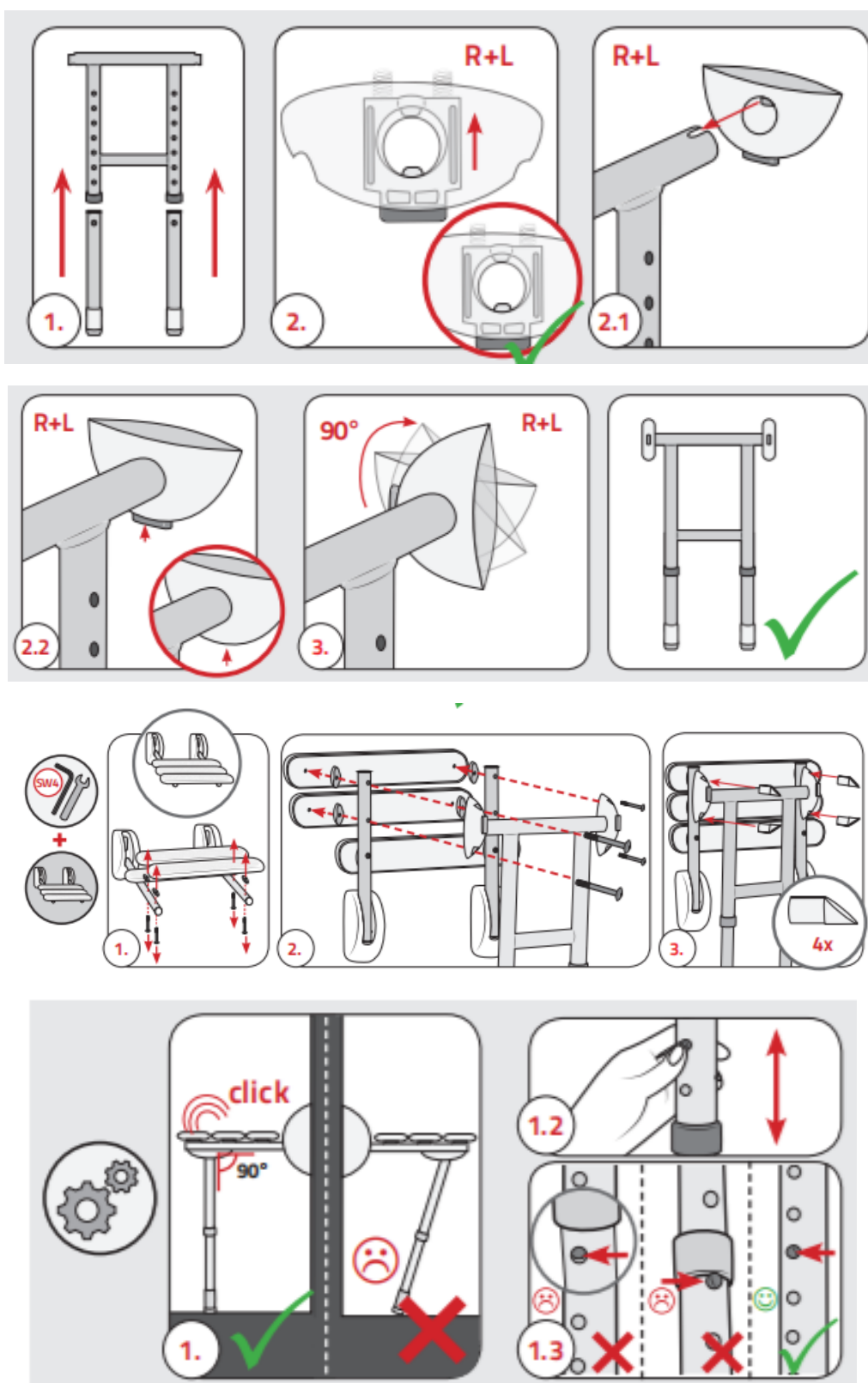

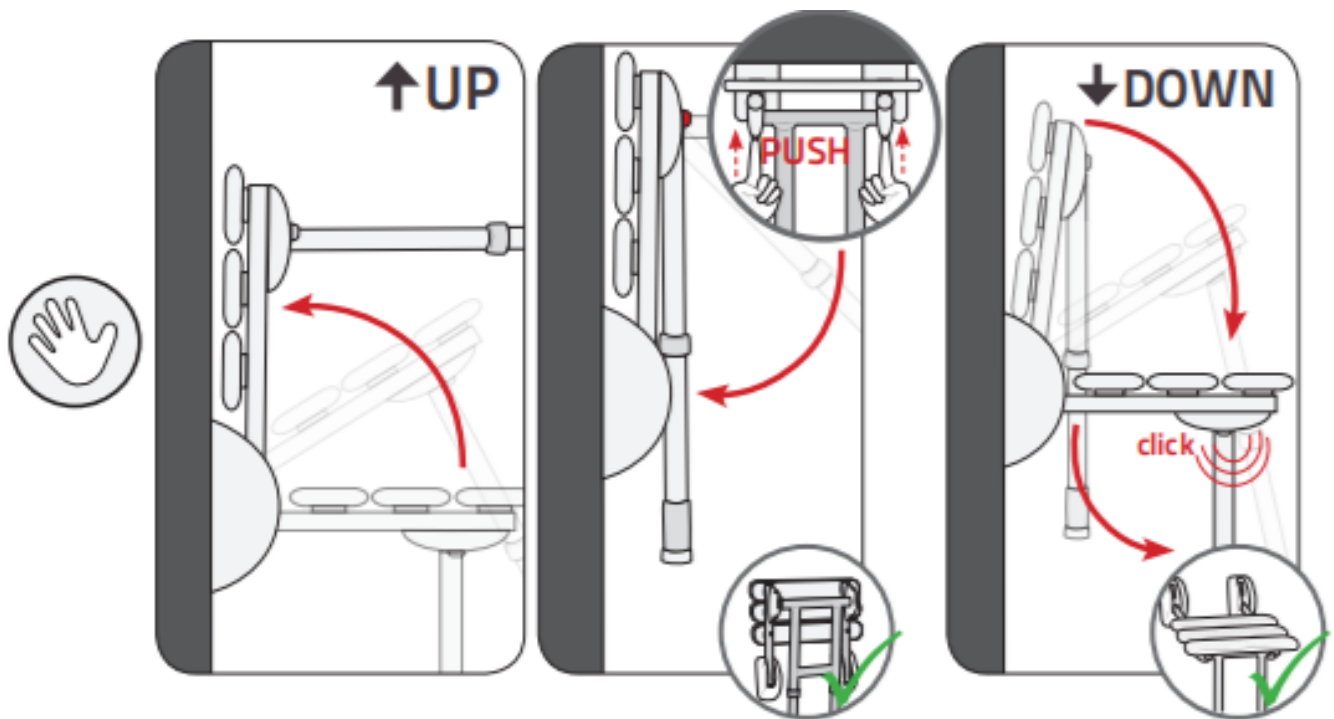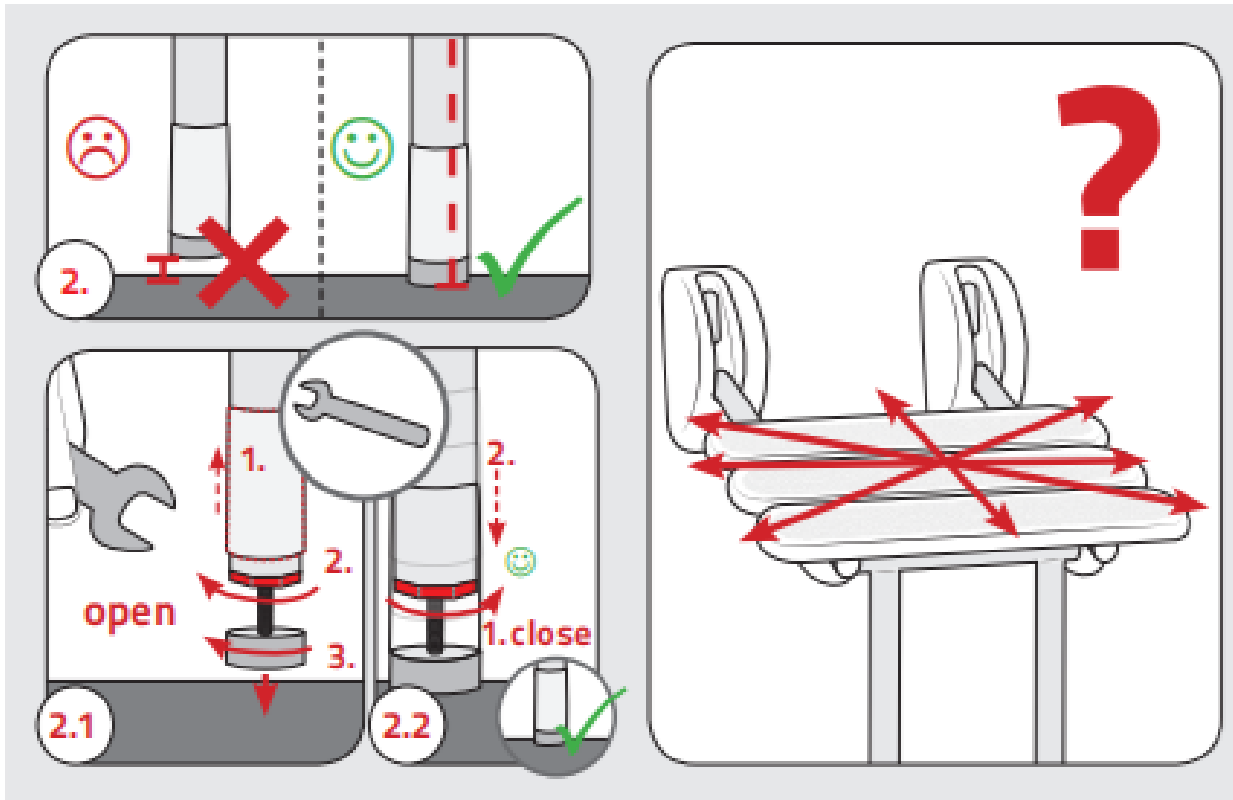



Indicatii importante!

Dragi clienti, cititi cu atentie instructiunile de siguranta inainte de utilizare si pastrati manualul pentru utilizare ulterioara. Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru montarea defectuoasa sau utilizarea necorespunzatoare a produsului.

Instructiuni de siguranta:

Adaptorul XL este conceput pentru a fi utilizat in incaperi umede din spatii private si serveste drept suport pentru RIDDER Scaun de dus rabatabil PRO.

Inainte de utilizare, verificati pozitia reglarii pe inaltime a scaunului.

Picioarele trebuie sa se sprijine pe toate punctele de sprijin.

Nu stati pe scaun inainte de fixarea corespunzatoare a acestuia.

Pastrati materialele de ambalare departe de copii.

Suprafetele umede pot afecta functia antiderapanta.

Certificatul nu contine teste pentru utilizarea persoanelor / pacientilor care se afla in sectoarele de reabilitare sau de ingrijire medicala.

Utilizarea maxima recomandata este de 5 ani.

Nu utilizati daca produsul este deteriorat.

Instructiuni de curatare si ingrijire:

Va rugam sa acordati atentie instructiunilor de curatare si ingrijire.

In cazul utilizarii necorespunzatoare, produsul poate fi deteriorat.

Curatati-l cu apa si detergenti comerciali standard. Ulterior, puteti usca produsul cu o carpa.