



RIDDER | *Assistent*

★★★★★ PREMIUM



A0260001



CONTINUTUL PACHETULUI:



1x



2x



2x



2x




2x



1x

ASAMBLAREA:

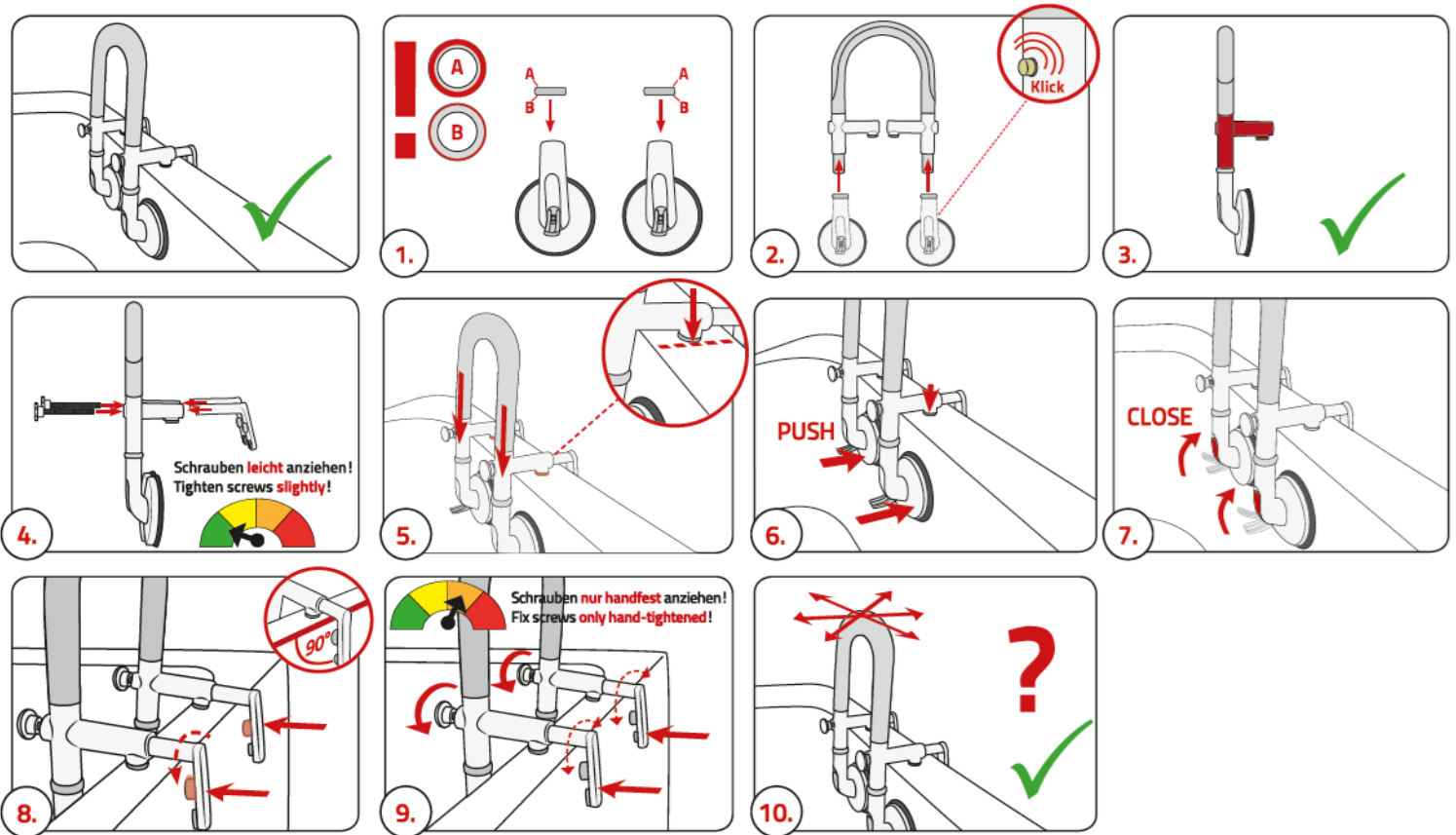



Indicatii importante!

Dragi clienti, cititi cu atentie instructiunile de siguranta inainte de utilizare si pastrati manualul pentru utilizare ulterioara. Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru montarea defectuoasa sau utilizarea necorespunzatoare a produsului.

Instructiuni de siguranta:

Sistemul de accesibilitate cu ventuze faciliteaza accesul in cada.

Suprafata de montare pe care sunt atasate cele doua ventuze uscata, neteda si etansa. Ansamblul trebuie sa fie adaptat nevoilor si conditiilor utilizatorilor. Inainte de fiecare utilizare, utilizatorul trebuie sa verifice daca produsul este suficient de stabil.

Va rugam sa retineti: Atasati dispozitivul de acces in cada cu ambele ventuze. Va recomandam sa atasati dispozitivul inainte de fiecare utilizare si sa verificati daca etansarea este suficient de puternica. Ajutorul de acces poate fi atasat optional in exteriorul cazii. In acest caz, va rugam sa apelati la un expert care sa decida daca constructia cabei este stabila.

Pastrati materialele de ambalare departe de copii.

Suprafetele umede pot afecta functia antiderapanta.

Certificatul nu contine teste pentru utilizarea persoanelor / pacientilor care se afla in sectoarele de reabilitare sau de ingrijire medicala.

Utilizarea maxima recomandata este de 5 ani.

Nu utilizati daca produsul este deteriorat.

Instructiuni de curatare si ingrijire:

Va rugam sa acordati atentie instructiunilor de curatare si ingrijire.

In cazul utilizarii necorespunzatoare, produsul poate fi deteriorat.

Curatati-l cu apa si detergenti comerciali standard. Ulterior, puteti usca produsul cu o carpa.