



RIDDER | *Assistent*

★★★★★ COMFORT



A180101





Stimate client,

Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta inainte de utilizare si sa pastrezi manualul pentru utilizarea in continuare.

Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru asamblarea defectuoasa sau utilizarea necorespunzatoare a produsului.

Instructiuni de siguranta:

Acest produs este conceput pentru aplicarea in incaperi umede si serveste doar ca scaun in cada. Verificati pozitia scaunului inainte de fiecare utilizare; consolele trebuie sa se sprijine corespunzator pe toate cele 4 puncte de contact de pe marginea cazii.

Nu va ridicati in picioare pe scaun.

Pastrati materialele de ambalare departe de copii.

Suprafetele umede pot afecta functia antiderapanta. Certificatul nu contine teste pentru utilizarea persoanelor / pacientilor aflati in reabilitare sau ingrijire medicala.

Utilizarea maxima recomandata este de 5 ani.

Nu utilizati produsul daca este deteriorat.

Instructiuni de curatare si ingrijire:

Va rugam sa acordati atentie instructiunilor de curatare și ingrijire.

In cazul utilizarii necorespunzatoare, produsul poate fi deteriorat.

Curatati-l cu apa si detergenti obisnuiti din comert. Ulterior, puteti usca produsul cu o carpa.

CONTINUTUL PACHETULUI:




5x



10x



2x

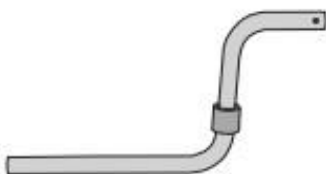

4x



2x



4x



4x



2x



10x



12x



1x



1x



1x



ASAMBLAREA:

